



# Schnittmuster für Wundauflagen


Benutzen Sie beim Zuschneiden nur sterile Materialien, z.B. Scheren, Pinzetten, Handschuhe, um eine Kontamination der Wundauflage zu verhindern. Nicht direkt verwendete Abschnitte müssen verworfen werden.

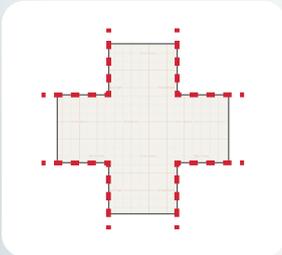


**Achsel-Zuschnitt**  
Aus einer quadratischen Wundauflage durch Ausschnitte an den vier Ecken ein Kreuz schneiden und unter der Achsel platzieren.

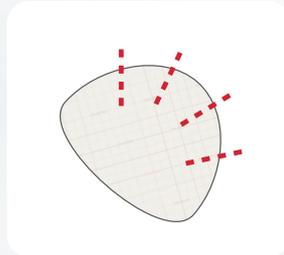


**Handschuh-Zuschnitt**  
DracoFoam Ferse viermal im gleichen Abstand an der geschlossenen Seite etwa 1,5 cm tief einschneiden. Anschließend den Verband über die Hand schieben und die Finger durch die vier Einschnitte führen.

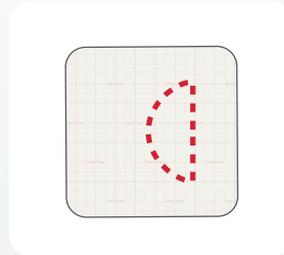


**Ohr-Zuschnitt**  
Aus der Wundauflage DracoFoam einen Halbkreis ausschneiden und das Ohr durch die Wundauflage führen. Das Halbrund liegt hinter dem Ohr.

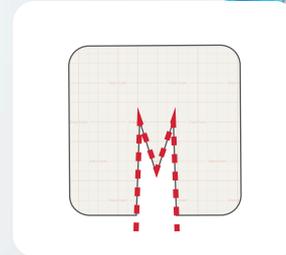


**Katheter-Zuschnitt**  
DracoFoam an einer Seite M-förmig einschneiden, anschließend den Schlauch durch den Einschnitt führen. Nach dem Durchführen des Schlauches die Wundauflage wieder zusammensetzen.

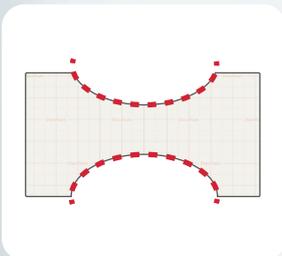


**Zehenzwischenraum**  
Aus der Wundauflage oben und unten Halbkreise/Ellipsen ausschneiden und zwischen den Zehen platzieren.

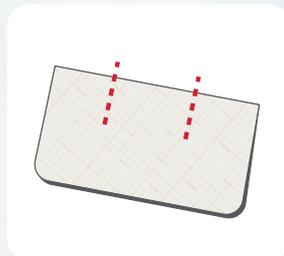


**Zehenzwischenraum-Zuschnitt**  
DracoFoam in der Hälfte knicken und die geschlossene Seite an zwei Stellen im Abstand von 1 bis 2 cm einschneiden. Zehen durch die Einschnitte führen.

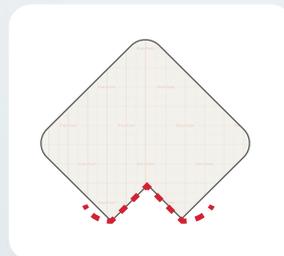


**Fuß – V-förmiger Zuschnitt für Außenseite**  
DracoFoam an einer Ecke V-förmig einschneiden, an den Fuß anpassen und die Ecken des Einschnitts an der Zehenninnenseite umschlagen.

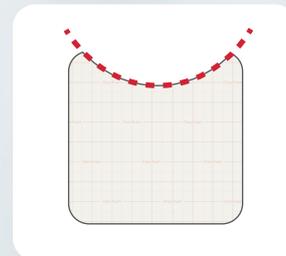

**Fußballen**  
DracoFoam an einer Seite oval einschneiden und auf dem Fußballen platzieren. Dabei nicht zu hoch in die Zehenzwischenräume ragen lassen.

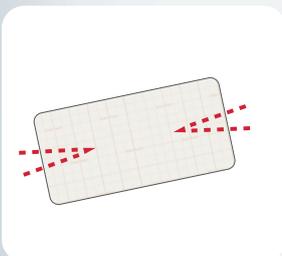

**Brust-Zuschnitt**  
Aus einer rechteckigen Wundauflage (z.B. DracoFoam 10 cm x 20 cm) zwei schmale, etwa 4 cm tiefe Dreiecke aus der kurzen Seite ausschneiden. Brust anheben und die Wundauflage mit der langen Seite unter der Brust applizieren. Einschnitte tiefer ansetzen, falls eine höhere Flexibilität erforderlich ist.

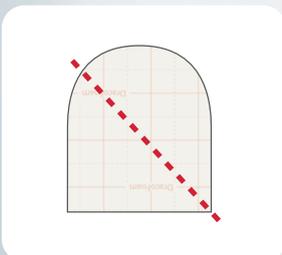

**Ohr-Zuschnitt**  
DracoFoam Zehenkappe groß diagonal durchschneiden und über das Ohr schieben.

## Schon gewusst?

Für Zeh und Ferse hat DRACO® schon passende Produkte, die Sie nicht mehr zuschneiden müssen! Informieren Sie sich unter:  
[www.draco.de/schaumstoff-wundauflagen/](http://www.draco.de/schaumstoff-wundauflagen/)



**DracoFoam** **DracoFoam**  
Zehenkappe Ferse

Sie benötigen sterile Muster zum Testen? [www.draco.de/muster](http://www.draco.de/muster)